



## Produktinformation

### Anwendungsbereich

oro® Vliestücher sind besonders hochwertige, reißfeste Vliestücher. oro® Vliestücher sind allgemein zum Tränken mit Flächendesinfektionsmitteln geeignet und können in allen Funktionsbereichen im Krankenhaus, bei Rettungsdiensten, in Pflegeeinrichtungen (Altenheime, etc.), in der Lebensmittelherstellung und -verarbeitung und allen anderen Bereichen, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist, eingesetzt werden. Wir empfehlen als Tränkflüssigkeit für die oro® Vliestücher die Gebrauchslösungen der Konzentrate von B 10, B 15, B 20 und B 25 und die gebrauchsfertigen Präparate B 30, B 40 oder B 45. oro® Vliestücher geben die Desinfektionslösung sehr gut ab und gewährleisten die vollständige Benetzung der zu desinfizierenden Flächen. oro® Vliestücher lassen sich aufgrund ihrer Größe und ihres Materials leicht falten und den Anforderungen anpassen, so dass auch kleine und verwinkelte Oberflächen erreicht werden können. Die Verwendung der oro® Vliestücher reduziert die Vorbereitungszeit für die Desinfektionsmaßnahmen und den Desinfektionsmittelverbrauch. Die getränkten oro® Vliestücher in der Spenderbox sind vor Kontamination und Verdunstung geschützt.

### Produktvorteile

- Hochwertige, reißfeste und fusselfreie trockene Vliestücher in wiederbefüllbarer Spenderbox.
- Universell einsetzbar für die Gebrauchslösungen der Konzentrate B 10, B 15, B 20 und B 25 und den gebrauchsfertigen Präparaten B 30, B 40 oder B 45.
- Fein strukturierte Vliestücher –sehr gute Benetzung und kein Zerkratzen der Oberflächen.
- Extragroße Tücher mit 200 x 300 mm.
- Füllvolumen – Spenderbox und 180 Tücher mit 2,5 l Lösung benetzen.
- Nachgewiesene Desinfektionswirkung und Stabilität der Wirkstofflösungen.
- Voll aktiv vom ersten bis zum letzten Tag – verwendbar bis zu 28 Tagen.
- Praktische wiederverschließbare Spenderbox zum Nachfüllen.
- Hohe Wirtschaftlichkeit – große Zeitersparnis durch einmalige Herstellung der getränkten Desinfektionstücher und sparsamer Desinfektionsmittelverbrauch. Ausreichend für 180 Desinfektionsvorgänge.

### Anwendung

oro® Vliestücher werden zur Desinfektion und Reinigung von Flächen wie Behandlungseinheiten, Arbeitsflächen, Wänden, Gegenständen aller Art, medizinischen Geräten, etc. angewendet.

B 15 entsprechend der gewünschten Einwirkzeit als 1 bis 3 %-ige Wirkstofflösung, B 20 als 1 bis 2 %-ige, B 10 als 2 %-ige, und B 25 als 1 %-ige Lösung herstellen. B 40, B 30 oder B 45 sind gebrauchsfertige Lösungen, die ohne Verdünnung angewendet werden.

Vliestücher in der Spenderbox mit 2,5 l Wirkstofflösung befüllen und 30 bis 60 Minuten bis zur erstmaligen Anwendung abwarten. Auf dem jeder Vliesrolle beiliegenden Etikett Produktname, Konzentration, Chargenbezeichnung, Ansatzdatum und Haltbarkeit - vier Wochen nach Befüllung - sowie den Namen der verantwortlichen Person eintragen und auf dem wiederverschließbaren Deckel der Spenderbox aufkleben.

Tuch entnehmen, wischen und die zu desinfizierende Oberfläche durch Wischen vollständig benetzen. Einwirkzeit entsprechend Gebrauchsinformation des eingesetzten Desinfektionsmittels einhalten. Spenderbox nach jeder Tuchentnahme wieder dicht verschließen.

Für die Wiederbefüllung Vlies- und Flüssigkeitsrückstände aus der Spenderbox sowie Etikett auf dem Deckel entsorgen. Spenderbox inkl. Deckel mit Desinfektionstuch auswischen. Für die gereinigte Spenderbox neue Tücherrolle und Anwendungslösung bereitstellen und Spenderbox befüllen, erstes Tuch einfädeln, Deckel schließen und Wartezeit einhalten. Neues beschriftetes Etikett auf den Deckel aufkleben.

### Produktzusammensetzung

oro® Vliestücher sind Vliestücher aus Polyester und Viskose (50 g/m<sup>2</sup>).

### Packungsgröße

Basisset: 1 Spenderbox, 1 Tuchrolle mit 180 Tüchern  
Nachfüllpackung: 4 Tücherrollen mit je 180 Tüchern im Karton

### Zubehör

Wandhalter für Spenderbox

### Haltbarkeit

Getränkte Tücher innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen.

### Ökologie

Spenderbox ist aus Polypropylen und die Vliesstofftücher aus Viskose und Polyester und damit stofflich und thermisch verwertbar.



### Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro® Hygienesystems

Instrumentendesinfektion • Desinfektion von Flächen und Inventar • Desinfektion und Pflege von Händen und Haut • Spezialanwendungen • Zubehör

Stand der Information 2011-02