

# ABSAUGGERÄTEDESINFEKTION

1



- Herstellerhinweise beachten. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

2



- Vor Gebrauch des Absauggeräts 10 bis max. 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen.

3



- Zusätzlich 2 %ige gebrauchsfertige D 10-Lösung in einem separaten Behälter ansetzen: 20 ml Konzentrat per Dosierhilfe entnehmen, mit Wasser auf 1 Liter auffüllen.

4



- Nach jeder Anwendung des Geräts Katheter entsorgen, einige ml D 10-Gebrauchslösung durch den Schlauch saugen. Sterilen Einwegkatheter aufsetzen.

5



- 1 x täglich kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche etc.) vollständig bedeckt in D 10-Gebrauchslösung einlegen. (Achtung: keine Filter einlegen!) Angegebene Einwirkzeit genau beachten.

6



- Absauggerät vom Stromnetz trennen. Gerät äußerlich mit D 10-Gebrauchslösung wischdesinfizieren. Einwirken lassen. Alternativ können auch B 15 Desinfektionstücher verwendet werden.

7



- Nach der Einwirkzeit eingelegte, desinfizierte Teile mit Wasser spülen. Teile erst nach Trocknung montieren und an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.

8



- **D 10 Absauggerätedesinfektion**
- Auch für Inhaliergeräte
- **B 15 Desinfektionstücher**
- Schnell wirksam - ohne Alkohol