

DOSIERANLEITUNG FÜR DOSIERKOPF

Dosierplan für oro® Desinfektionsmittel

Menge	B5		B10		B15		B20		B25		A20		D10	
	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g
1 Liter	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	100	100	10	10
2 Liter	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100	200	200	20	20
4 Liter	40	40	80	80	120	120	160	160	200	200	400	400	40	40
6 Liter	60	60	120	120	180	180	240	240	300	300	600	600	60	60
8 Liter	80	80	160	160	240	240	320	320	400	400	800	800	80	80
10 Liter	100	100	200	200	300	300	400	400	500	500	1000	1000	100	100

orochemie

■ Schritt 1:
Genau Dosierangaben dem
Dosierplan entnehmen.



■ Schritt 2:
Gewünschten Behälter (z.B.
Eimer, Instrumentenwanne)
mit klarem, kaltem Wasser
bis zur benötigten Menge
auffüllen.
(siehe Dosierplan)

_____ Liter



■ Schritt 3:
Dosierkopf auf 1 l Flasche
Desinfektionsmittelkonzentrat
schrauben.



■ Schritt 4:
Durch Drücken der Flasche
den Dosierkopf bis zur
gewünschten Markierung
füllen.



■ Schritt 5:
_____ Dosierkopffüllungen in
den Eimer geben. Dafür Schritt
4 und 5 _____ mal wieder-
holen (siehe Dosierplan). Gut
umrühren!



■ Desinfektionsmittel niemals
mit Reinigungsmittel
mischen!

Dosierplan für oro® Desinfektionsmittel

Menge	B5		B10		B15		B20		B25		A20		D10	
	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g	ml	g
1 Liter	10	10	20	20	30	30	40	40	50	50	100	100	10	10
2 Liter	20	20	40	40	60	60	80	80	100	100	200	200	20	20
4 Liter	40	40	80	80	120	120	160	160	200	200	400	400	40	40
6 Liter	60	60	120	120	180	180	240	240	300	300	600	600	60	60
8 Liter	80	80	160	160	240	240	320	320	400	400	800	800	80	80
10 Liter	100	100	200	200	300	300	400	400	500	500	1000	1000	100	100

orochemie

Gebrauchslösung: _____ Liter

Konzentrat: _____ ml

