

INHALIERGERÄTEDESINFEKTION

1



- Herstellerhinweise beachten. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

2



- Nach Gebrauch das Inhaliergerät vom Stromnetz trennen.

3



- 2 %ige D 10-Gebrauchslösung in einem Behälter ansetzen: Pro Liter gebrauchsfertige Lösung 20 ml Konzentrat per Dosierhilfe entnehmen, mit Wasser auf 1 Liter auffüllen.

4



- Die Verneblerteile (Medikamentenbecher und -düse, Verneblerhaube, Kamin, Inhaliermaske und Mundstück) abnehmen bzw. abschrauben.

5



- Verneblerteile in die vorbereitete D 10-Gebrauchslösung vollständig einlegen. Angegebene Einwirkzeit genau beachten.

6



- Das Vernebler-Handstück und Gehäuse des Geräts keinesfalls in Flüssigkeit einlegen, sondern äußerlich mit D 10-Gebrauchslösung wischdesinfizieren. Ebenfalls einwirken lassen. Alternativ können auch B 15 Desinfektionstücher verwendet werden.

7



- Nach der Einwirkzeit eingelegte, desinfizierte Teile mit Wasser spülen. Teile erst nach Trocknung wieder montieren und anschl. an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.

8



- **D 10 Absaugerätedesinfektion**
- Auch für Inhaliergeräte
- **B 15 Desinfektionstücher**
- Schnell wirksam - ohne Alkohol