

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
Das Tragen von Schmuck/Uhren an Händen und Unterarmen ist während des Dienstes nicht gestattet! Fingernägel kurz und sauber halten!				
 Hygienische Händedesinfektion	HD 410 Händedesinfektion 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen	- bei Arbeitsbeginn und -ende - vor/ nach jeder Behandlung - nach Kontakt mit infektiösen Personen, Sekreten oder Material - nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen - vor Pausen, Nahrungsaufnahme	Alle Mitarbeiter
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser und 1 Hub aus Spender (2 ml) gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	- bei Bedarf, - nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung	Alle Mitarbeiter
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- bei Bedarf	Alle Mitarbeiter
Hautschutz	C 60 Hautschuttschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Einmalhandschuhen	Alle Mitarbeiter
Hautdesinfektion (am Patienten)	C 20 Hände + Haut Desinfektion 30 Sek.	aufsprühen und trocknen lassen oder auf einen Tupfer geben und die Haut benetzen, nicht trockenreiben, 30 sec einwirken lassen	- vor Injektionen und Punktionen aller Art	Arzt/ Medizinische Fachangestellte
Auf spannungslosen Zustand der Geräte achten!				
 Arbeitsflächen, Einrichtungsgegenstände (z. B. Untersuchungstische, Verbandswagen), medizinische Geräte, etc.	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf - nach Kontamination sofort	Medizinische Fachangestellte
Untersuchungsliegen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	bei Auflagenwechsel nach jedem Patienten: - 1 x täglich nach Arbeitsende und - nach der Behandlung von Patienten mit Hautinfektionen bei Arbeit ohne Auflagen: - Desinfektion bei Patientenwechsel - bei Bedarf	Medizinische Fachangestellte
Fieberthermometer, Stethoskope, Blutdruckmanschetten, Blutzuckermessgeräte etc.	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach jeder Benutzung	Medizinische Fachangestellte
Sonstige kleine Flächen (z. B. Türgriffe, Tablett für Injektionsspritzen und Instrumente)	B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach Kontamination - bei Bedarf	Medizinische Fachangestellte
Fußböden	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf	Reinigungspersonal/ Medizinische Fachangestellte
Toiletten und sanitäre Einrichtungen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei sichtbarer Kontamination - bei Bedarf	Reinigungspersonal/ Medizinische Fachangestellte
Abfallbehälter	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 60 Desinfektionstücher 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach jeder Leerung - bei sichtbarer Kontamination	Reinigungspersonal/ Medizinische Fachangestellte
 Instrumente allgemeine, chirurgische Instrumente	A 20 Instrumentendesinfektion 2 %, 15 Min.	Manuelle Instrumentenaufbereitung: - zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen - auf vollständige Benetzung achten - einwirken lassen - ggf. nachreinigen und erneut einlegen - gründlich mit Wasser abspülen - trocknen und Sterilisation zuführen	- direkt nach Gebrauch	Medizinische Fachangestellte
 Absauggeräte	D 10 Absauggerätedesinfektion 2 %, 1 Stunde	Vor Gebrauch 10 – 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen. Nach jeder Anwendung D 10-Gebrauchslösung durch Schlauch saugen. 1 x tägl. kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche, etc.) in Lösung einlegen, einwirken lassen, mit Wasser spülen. Gerät äußerlich mit D 10-Lösung wischdesinfizieren, einwirken lassen.	- vor Gebrauch - direkt nach Gebrauch - 1 x täglich	Medizinische Fachangestellte

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen, um der Überwachungspflicht zu genügen (BGR 250/TRBA 250, Punkt 5.2 und 4.1.2.3). Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln empfehlen wir, mit geeigneten Schutzhandschuhen zu arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig: _____ Ort, Datum _____