

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
 Hygienische Händedesinfektion	HD 410 Händedesinfektion 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben bei groben Verschmutzungen: Zellstofftuch mit C 20 tränken und die Verschmutzungen vorab entfernen	- vor/ nach Patientenkontakt - vor/ nach Wundbehandlung u. invasiven Eingriffen - nach Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten und kontaminiertem Material - nach jedem Toilettenbesuch - nach Arbeiten/ Wartung am Auto	Rettungsdienstpersonal
Händereinigung	C 45 Waschlotion 100%	Hände mit kaltem Wasser und 1 Hub aus Spender (2 ml) gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	- bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende - nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung - bei Bedarf	Rettungsdienstpersonal
Händepflege	C 50 Pflegelotion 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- bei Bedarf	Rettungsdienstpersonal
Hautschutz	C 60 Hautschuttschaum 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Einmalhandschuhen	Rettungsdienstpersonal
Hautdesinfektion	C 20 Hände + Haut Desinfektion 100%, 30 Sek.	aufsprühen und trocknen lassen oder auf einen Tupfer geben und die Haut benetzen, nicht trockenreiben, 30 sec einwirken lassen	- vor Injektionen und Punktionen aller Art	Rettungsdienstpersonal
 Fahrerraum: Lenkrad, Hebel, Griffe innen und außen Krankenträger/-stuhl, Auflagen, Gurte, Vakuum-Matratze, Schaufeltrage	B 15 Desinfektionstücher 100%, 2 Min./ volle Viruzidie 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- 1 x wöchentlich - nach jeder Benutzung - nach Kontamination	Rettungsdienstpersonal
patientenferne (Schubladen, Schränke etc.) und patientennahe (Atemschutzmasken, Ambubbeutel etc.) Flächen	B 15 Desinfektionstücher 100%, 2 Min./ volle Viruzidie 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- patientennahe Flächen: 1 x täglich - patientenferne Flächen: 1 x wöchentlich - nach Kontamination sofort	Rettungsdienstpersonal
Blutdruckmanschetten, Stethoskope, Notfallkoffer, medizinische Geräte, Laryngoskopgriffe etc.	B 15 Desinfektionstücher 100%, 2 Min./ volle Viruzidie 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- bei Bedarf - mind. 1 x wöchentlich - nach Kontamination	Rettungsdienstpersonal
Steckbecken, Urinflaschen	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	für manuelle Desinfektion: entleeren, in Desinfektionslösung einlegen oder wischdesinfizieren, einwirken lassen, abspülen, trocknen	- nach jeder Benutzung	Rettungsdienstpersonal
Rettungswache: Toiletten, Sanitärräume Räumlichkeiten, die barfuß betreten werden	B 15 Wischdesinfektion 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. B 30 Schnelldesinfektion 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Fußboden mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, Oberflächen mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen entweder Tuch benetzen und kleine Oberflächen wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf	Reinigungspersonal Reinigungs-/ Rettungsdienstpersonal
 Instrumente allgemeine, chirurgische Instrumente, Intubationsbestecke, etc.	A 20 Instrumentendesinfektion 2 %, 15 Min.	Manuelle Instrumentenaufbereitung: - zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen - auf vollständige Benetzung achten - einwirken lassen - ggf. nachreinigen und erneut einlegen - gründlich mit Wasser abspülen - trocknen und Sterilisation zuführen	- direkt nach Gebrauch	Rettungsdienstpersonal
 Absauggeräte	D 10 Absauggeräte-desinfektion 2 %, 1 Stunde	Herstellangaben beachten. Vor Gebrauch 10 – 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen. Nach jeder Anwendung D 10-Gebrauchslösung durch den Schlauch saugen. 1 x tägl. kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche, etc.) in Lösung einlegen, einwirken lassen, mit Wasser spülen. Gerät äußerlich mit D 10-Lösung wischdesinfizieren, einwirken lassen.	- vor Gebrauch - direkt nach Gebrauch - 1 x täglich	Rettungsdienstpersonal
Medizinische Einmalinstrumente (Einmalspritzen, etc.)	Durchstichsicheren Behälter mit verschließbarem Deckel	verletzungssichere Entsorgung (Fertigspritzen/ Kanülen nicht zurück in die Abdeckung stecken)	- direkt nach Gebrauch	Rettungsdienstpersonal
gebrauchte Einmalmaterialien (Folien, Kompressen, etc.)	Reißfeste Säcke	Sammeln und Entsorgen über den Hausmüll	- sofort nach Gebrauch werfen - 1 x täglich und bei Bedarf leeren	Rettungsdienstpersonal
Berufs-/ Dienstkleidung	-Wäscherei	desinfizierend waschen getrennt von Straßenkleidern aufbewahren in Wäschesäcken/ -transportwagen sammeln gefüllte Wäschesäcke verschließen und zur Abholstelle bringen OP-Wäsche sterilisieren, verpackt aufbewahren	- täglich, bzw. bei jedem Schleusengang - Bei sichtbarer Verschmutzung oder starker Kontamination sofort	Rettungsdienstpersonal
Kontaminierte Wäsche, Abdecktücher,-decken, Schutzkleidung, etc.	-Wäscherei -Sterilisator			

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Regelmäßige Personalbelehrungen und schriftliche Dokumentation werden empfohlen, um der Überwachungspflicht zu genügen (BGR 250/TRBA 250, Punkt 5.2 und 4.1.2.3). Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln empfehlen wir, mit Handschuhen zu arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum: