

Bereich	Präparat Konzentration, Einwirkzeit	Vorgehensweise	Häufigkeit	Verantwortlich
 <b>Hygienische Händedesinfektion</b>	<b>HD 410 Händedesinfektion</b> 100%, 15 Sek. (Noroviren 1 Min.)	2 Hübe aus Spender (3-5 ml) auf die trockenen Hände geben, gründlich einreiben  <b>bei groben Verschmutzungen:</b> Zellstofftuch mit Händedesinfektionsmittel tränken und die Verschmutzungen <b>vorab</b> entfernen	- bei Arbeitsbeginn und -ende - vor/ nach jeder Behandlung - nach Kontakt mit infektiösen Tieren, Sekreten oder Material - nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen - vor Pausen, Nahrungsaufnahme	Alle Mitarbeiter
<b>Händereinigung</b>	<b>C 45 Waschlotion</b> 100%	Hände mit kaltem Wasser und 1 Hub aus Spender (2 ml) gründlich waschen, mit Einmalhandtuch trocknen	- bei Bedarf - nach der hygienischen Händedesinfektion bei sichtbarer Verunreinigung - vor der chirurgischen Händedesinfektion	Alle Mitarbeiter
<b>Händewaschung</b>	<b>C 45 Waschlotion</b> 100%	1 Hub aus Spender (2 ml) in die vorher mit kaltem Wasser angefeuchteten Hände geben, aufschäumen und Hände und Unterarme gemäß Standard-Waschverfahren 1 Min. gründlich waschen, danach mit kaltem Wasser abspülen und mit Einmalhandtuch trocknen, anschließend chirurgische Händedesinfektion	- minimal invasive Chirurgie MIC - operative Eingriffe	Arzt/ Fachpersonal
<b>Chirurgische Händedesinfektion</b>	<b>HD 410 Händedesinfektion</b> 100%, 1,5 Min	trockene Hände und Unterarme vollständig benetzen und gemäß Standard-Einreibeverfahren kräftig verreiben, während der gesamten Einwirkzeit feucht halten		
<b>Händepflege</b>	<b>C 50 Pflegelotion</b> 100%	erbsengroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- bei Bedarf	Alle Mitarbeiter
<b>Hautschutz</b>	<b>C 60 Hautschutzschaum</b> 100%	walnussgroße Menge in die sauberen, trockenen Hände einreiben	- 2-3 mal täglich - bei Bedarf - vor dem Tragen von Einmalhandschuhen	Alle Mitarbeiter
<b>Hautdesinfektion (am Tier)</b>	<b>C 20 Hände + Haut Desinfektion</b> 30 Sek.	aufsprühen und trocknen lassen oder auf einen Tupfer geben und die Haut benetzen, nicht trockenreiben, einwirken lassen	- vor Injektionen und Punktionen aller Art - vor Operationen	Arzt/ Fachpersonal
 <b>Arbeitsflächen, Einrichtungsgegenstände</b>  (Untersuchungstische, Mobiliar etc.) <b>Medizinische Geräte, etc.</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. <b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) <b>B 60 Desinfektionstücher</b> 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen  entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen  Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf  - nach Kontamination sofort	Fachpersonal
<b>Fußböden</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min.	mit geeigneter Nasswisch-Methode desinfizierend reinigen, einwirken lassen	- 1 x täglich - bei Bedarf	Reinigungspersonal/ Fachpersonal
<b>Toiletten und sanitäre Einrichtungen</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. <b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen  entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- 1 x täglich  - bei Bedarf	Reinigungspersonal/ Fachpersonal
<b>Wannen, Schüsseln (manuelle Aufbereitung)</b>	<b>B 15 Wischdesinfektion</b> 0,5%, 1 Std./ 1%, 15 Min./ 2%, 5 Min./ 3%, 2 Min./ volle Viruzidie: 2%, 15 Min. <b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.)	Oberfläche mit Tuch gründlich benetzen, einwirken lassen, ausspülen  entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen	- nach jeder Benutzung	Fachpersonal
<b>Fieberthermometer, Stethoskope, etc.</b>	<b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) <b>B 60 Desinfektionstücher</b> 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen  Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach jeder Benutzung	Fachpersonal
<b>Sonstige kleine Flächen (Türgriffe, Tablett für Injektionsspritzen und Instrumente etc.)</b>	<b>B 30 Schnelldesinfektion</b> 100 %, 2 Min. (Noroviren: 1 Min./ volle Viruzidie: 5 Min.) <b>B 60 Desinfektionstücher</b> 15 Sek. (Noroviren: 1 Min.)	entweder Tuch benetzen und wischen oder aufsprühen und ggf. wischen, einwirken lassen  Oberfläche mit Desinfektionstuch benetzen, einwirken lassen	- nach Kontamination - bei Bedarf	Fachpersonal
 <b>Instrumente</b> allgemeine, chirurgische Instrumente	<b>A 20 Instrumentendesinfektion</b> 2 %, 15 Min.	Manuelle Instrumentenaufbereitung: - zur Reinigung und Desinfektion in A 20 Gebrauchslösung einlegen - auf vollständige Benetzung achten - einwirken lassen		
 <b>Rotierende Instrumente</b> (z. B. Fräser, Schleifkörper)	<b>A 30 Desinfektion für rotierende Instrumente</b> 100 %- 1 Min. (Tauch- oder Ultraschallbad)	- ggf. nachreinigen und erneut einlegen - gründlich mit Wasser abspülen - trocknen und Sterilisation zuführen	- direkt nach Gebrauch	Fachpersonal
 <b>Absauggeräte</b>	<b>D 10 Absauggerätedesinfektion</b> 2 %, 1 Stunde	Vor Gebrauch 10 – 20 ml Konzentrat im Auffangbehälter des Absauggeräts vorlegen. Nach jeder Anwendung D 10-Gebrauchslösung durch Schlauch saugen. 1 x tägl. kontaminierte Teile (Behälter, Schläuche, etc.) in Lösung einlegen, einwirken lassen, mit Wasser spülen. Gerät äußerlich mit D 10-Lösung wischdesinfizieren, einwirken lassen.	- vor Gebrauch - direkt nach Gebrauch  - 1 x täglich	Fachpersonal

Dieser Desinfektionsplan ist vom Anwender dem jeweiligen Stand der Technik und den internen Gegebenheiten anzupassen. Bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln empfehlen wir, mit geeigneten Schutzhandschuhen zu arbeiten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Zuständig:

Ort, Datum