

ДЕЗИНФЕКЦИЯ АСПИРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1



- Соблюдать инструкцию производителя. Во время работы носить пригодные защитные перчатки.

2



- Перед использованием залить в емкость аспирационного аппарата от 10 до макс. 20 мл. концентрата.

3



- Дополнительно подготовить в отдельной емкости 2 %-ый готовый препарат D 10-: 20 мл. концентрата из флакона-дозатора на 1 литр воды.

4



- После каждого применения аппарата утилизировать катетер, аспирировать через шланг несколько мл. готового препарата D 10. Надеть стерильный одноразовый катетер.

5



- 1 x ежедневно погружать контаминированные части (емкость, шланги и т.д.) в готовый препарат D 10. (Внимание: не погружать фильтры) Соблюдать время экспозиции.

6



- Отключить от сети аспирационный аппарат. Наружные поверхности аппарата обработать готовым препаратом D 10. Дать воздействовать. Альтернативно могут быть использованы дезинфицирующие салфетки В 15.

7



- После окончания времени экспозиции погруженные, продезинфицированные части промыть водой. Сборка производится после полного высыхания частей, хранить в хорошо проветриваемом месте.

8



- D 10 дезинфекция аспирационных систем
- Также пригоден для ингаляционных аппаратов
- Дезинфицирующие салфетки В 15 ■ быстроактивные - без содержания спиртов