

# orochemie-Newsletter

Ausgabe II/2013

Thema:

## Tuchspendersysteme zur Desinfektion Ein kleiner Ratgeber

# Hygieneplan

Nutzen Sie diesen Newsletter zur Ergänzung Ihres Hygieneplans (Kap. Flächendesinfektion) oder als Thema für Schulungen und Teambesprechungen.

Vliestuch-Spendersysteme zur Desinfektion von Oberflächen, Gegenständen oder medizinischen Geräten sind äußerst anwenderfreundlich. Die mit Desinfektionsmittel getränkten Tücher sind sofort einsetzbar, ersparen dem Anwender die tägliche Dosierung von Desinfektionskonzentraten und sind sehr wirtschaftlich aufgrund des sparsamen Desinfektionsmittelverbrauchs. Auch die hohen Kosten (Zeit- und Energieaufwand, Gerätschaften etc.) bei der Aufbereitung textiler Wischtücher entfallen. Kein Wunder, dass solche Systeme in der täglichen Desinfektion immer häufiger zum Einsatz kommen.

### Verschiedene Produkte zur Auswahl

Unterschiedliche Tuchvarianten sind derzeit auf dem Markt erhältlich, z. B.

- gebrauchsfertige, vorgetränkte Feuchttücher, die keine weitere Arbeitsvorbereitung erfordern, oder
- Trockentücher zum Selbsttränken, die eine größere Flexibilität bei der Auswahl des Desinfektionsmittels bieten.



### Allgemeine Regeln zur sicheren Anwendung

Egal welchen Typ Vliestücher Sie verwenden, beachten Sie stets folgende Grundregeln, um die Tücher vor Austrocknung und Kontamination zu schützen und somit ein sicheres Desinfektionsergebnis zu erzielen:

**Regel 1:** Verschließen Sie den Deckel der Spenderbox immer sorgfältig nach der Tuchentnahme.

**Regel 2:** Vermeiden Sie, dass Tücher aus der Box heraushängen. Frei herausragende Tücher dürfen weder verwendet, noch in den Behälter zurückgeschoben werden.

### Regeln für das Selbsttränken von Trockentüchern

Trockentücher sind praktisch und flexibel in der Anwendung, erfordern jedoch Zeit zur Vorbereitung. Halten Sie dabei folgende Regeln ein:

- Achten Sie auf die *Kompatibilität (Verträglichkeit)* des Tuchmaterials mit dem zum Tränken eingesetzten Desinfektionsmittel. Aus den Herstellerangaben entnehmen Sie, welche Produkte Sie einsetzen dürfen.
- Halten Sie die vom Hersteller empfohlene *Konzentration und Menge der Tränklösung* strikt ein.
- Achten Sie nach der Wiederbefüllung auf die *korrekte Beschriftung* des Behälters mit Füllung und Standzeit.
- Beachten Sie, dass die *vorgegebene Standzeit* der getränkten Tücher nicht überschritten wird.
- *Und besonders wichtig!* Bereiten Sie die Spenderbox vor der erneuten Tränkung hygienisch auf, optimalerweise maschinell bei 60-70°C (mind. 5 Min.) oder manuell. Der Behälter muss gründlich desinfizierend gereinigt und getrocknet werden. Sehen Sie dazu die Herstellerangaben.

### Gebrauchsfertige Feuchttücher als Alternative

Sollten bei Ihnen die Aufbereitung und Selbsttränkung der Trockentuchspendersysteme aufgrund Ihrer speziellen Arbeitsbedingungen nicht möglich sein, so empfiehlt es sich, gebrauchsfertige Feuchttücher einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.orochemie.de](http://www.orochemie.de).

Bitte wenden!

## Das oro<sup>®</sup> Hygienesystem bietet:

### oro<sup>®</sup> Vliestücher – Trockentücher zum Selbsttränken

- oro<sup>®</sup> Vliestücher standard: 180 Tücher in der Spenderbox
- oro<sup>®</sup> Vliestücher kompakt: 60 Tücher in der Spenderbox
- Jeweils auch als Nachfüllpackung erhältlich



### B 15 Desinfektionstücher – gebrauchsfertige Feuchttücher

- Schnell wirksam & ohne Alkohol
- 50 Tücher in der Spenderbox
- Auch als Nachfüllpackung erhältlich



### B 60 Desinfektionstücher – gebrauchsfertige Feuchttücher

- Praktisch für kleinere Flächen
- 110 Tücher in der Dose
- Auch als Nachfüllpackung erhältlich



Flächendesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.


Siehe [www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)



Informationen und Bestellung auch unter  
Tel. (0 71 54) 13 08-46 od. -39  
Fax (0 71 54) 13 08-40 od. -42

## Krankheitserreger von A-Z

Sie hätten gern gewusst, welche Desinfektionsmittel bei bestimmten Krankheitserregern wirken? orochemie bietet Ihnen jetzt zur Information die Übersicht „Krankheitserreger von A-Z“ unter [www.orochemie.de/de/service\\_krankheitserreger.php](http://www.orochemie.de/de/service_krankheitserreger.php)

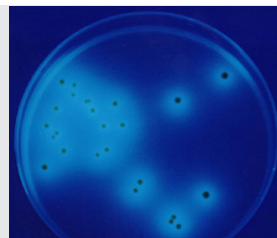

## Kürzere Einwirkzeiten nach VAH


A 20 Instrumentendesinfektion – jetzt wirksam in 5 Minuten  
B 30 Schnelldesinfektion – jetzt wirksam in 1 Minute

Mehr dazu unter [www.orochemie.de](http://www.orochemie.de)



## orochemie-Dosierrechner – praktisch und individuell

Drucken Sie Ihren persönlichen Dosierplan mit genauen Angaben zur Konzentration und Wassermenge mit dem orochemie-Dosierrechner unter [www.orochemie.de/de/service\\_dosierrechner.php](http://www.orochemie.de/de/service_dosierrechner.php)

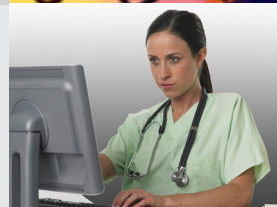

## Fotoaktion 2013 – mitmachen und gewinnen!

Hygiene macht Spaß mit orochemie! Machen Sie mit bei unserer Fotoaktion unter [www.orochemie.de/fotoaktion](http://www.orochemie.de/fotoaktion) und gewinnen Sie z. B. ein Konzert- oder Musicalbesuch mit Hotelübernachtung (für zwei Personen), ein Tablet-Computer, eine Digitalkamera u. v. m.



orochemie-Neuigkeiten – jetzt auch unter



orochemie

orochemie GmbH + Co. KG · Max-Planck-Str. 27 · D-70806 Kornwestheim · Tel. (0 71 54) 13 08-0 · Fax (0 71 54) 13 08-40 · [info@orochemie.de](mailto:info@orochemie.de) · [www.orochemie.de](http://www.orochemie.de) · [www.hygienewissen.de](http://www.hygienewissen.de) · <http://shop.orochemie.de>  
Sitz: 70806 Kornwestheim · Amtsgericht Stuttgart HRA 201527 · Persönlich haftende Gesellschaft: Orochemie Verwaltungsgesellschaft m.b.H. · Amtsgericht Stuttgart HRB 200833 · Geschäftsführer: Martin Dürrstein, Christian Pflug